

magnetism 
MEGUMI

家庭用電気磁気治療器 めぐみ



取扱説明書

本器を安全に正しくご使用いただくため、ご使用前に
本書をよくお読みください。

も く じ

使用上のご注意

4

仕様・各部のなまえ

7

- 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
- 各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

設置のしかた

9

- 本体を設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- コントローラーを本体に接続する・・・・ 10

治療のしかた

11

- 治療を開始する・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
- 治療を一時停止する・・・・・・・・・・・・ 11
- 治療を再開する・・・・・・・・・・・・・・ 12
- 治療を終了する・・・・・・・・・・・・・・ 12
- 治療を中断するには・・・・・・・・・・・・ 12

お手入れ・保管のしかた

13

- お手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・ 13
- 保管のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

故障かな？と思ったら

14

- 修理を依頼される前に・・・・・・・・・・・・ 14

保証について

15

使用上のご注意

ご使用の前に、この「使用上のご注意」をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。

ここでは、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

この表示の欄は、人が死亡する、または重傷を負うことが想定される内容です。



注意

この表示の欄は、人が軽傷を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。



警告



次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性があるので使用しないでください。

- ★ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ★ 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人



低温火傷の原因になります。

- ★ 使用中に熱く感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- ★ 長時間、同一部位に対して使用しないでください。
- ★ 肌と接触する金属類は取り外して使用してください。
- ★ 居眠りをしながらや、就寝時には使用しないでください。
- ★ 安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、次のような人は単独で使用しないでください。
 - 子供を含む、補助が必要な人、自分で意思表示ができない人
 - 皮膚の弱い人、皮膚感覚の弱い人
 - 睡眠薬、かぜ薬など、眠くなる薬を服用した人
 - 深酒や疲労の激しい人

⚠ 注意



医師の治療を受けている人や次の人は、必ず医師に相談してからご使用ください。

- ★ 悪性腫瘍のある人
- ★ 心臓に障害のある人
- ★ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- ★ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ★ 温度感覚喪失が認められる人
- ★ 皮膚に感染症又は創傷のある人
- ★ 安静を必要とする人
- ★ 体温 38℃以上（有熱期）の人
 - 急性炎症症状〔倦怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期
 - 衰弱しているとき
- ★ 捻挫、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人



感電や怪我の原因になります。

- ★ 分解、改造は絶対にしないでください。
- ★ お客様ご自身による修理は絶対にしないでください。電源コードが破損した際や故障を発見した際は、販売店または製造販売元に連絡してください。



感電や故障の原因になります。

- ★ 浴室など、湿度が高い場所では使用しないでください。
- ★ 使用中に水やお茶などがかからないようにしてください。



次のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ★ 変形、変色、異臭、異音などの異常が生じているとき
- ★ 使用中に破損や故障が発見されたとき
- ★ 使用中に停電したとき

⚠ 注意



ご使用前には次のことにご注意ください。

- ★ スイッチ類が正常に動作するか確認してから使用してください。
- ★ すべてのコードが正しく確実に接続されているか確認してから使用してください。
- ★ しばらく使用しなかったときは、取扱説明書に準じて本品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- ★ 子供が本品で遊ばないように監視してください。



- ★ 時計、磁気カードなど、磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- ★ 他の治療器と同時に使用しないでください。
- ★ 交流 100V 以外では使用しないでください。



ご使用中には次のことにご注意ください。

- ★ 使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。
- ★ 同一部位への使用は必ず 30 分以内としてください。
- ★ 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。



ご使用後及び保管には次のことにご注意ください。

- ★ 使用後は必ず主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ★ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- ★ 次回の使用に支障がないように清浄にし、湿気の少ない場所に整理・保管してください。
- ★ お手入れは、電気掃除機で表面のほこりを吸い取る程度にしてください。丸洗いはできません。磁気ユニットの汚れは、中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふき取ってください。
- ★ 梱包資材を含む本品の廃棄については、各自治体の定めに従ってください。

仕様・各部のなまえ

仕様

管理医療機器 認証番号 301AKBZX00006A01

機械器具 81 磁気治療器 家庭用電気磁気治療器 (71015000)

使用目的又は効果	装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用すること。					
動作原理	交流電気によって磁場を作り、磁力によって患部を治療します。					
本体寸法	1620 × 510 × 70 mm					
定格電圧	AC 100V					
製品タイプ※1	ベーシック		アドバンス		プレミアム	
本体重量	10 kg		14 kg		16 kg	
定格周波数	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
定格電流	2.8 A	2.3 A	5.4 A	4.4 A	8.0 A	6.8 A
電力※2	280 VA	230 VA	540 VA	440 VA	800 VA	680 VA
最大磁束密度	180 mT	140 mT	180 mT	140 mT	180 mT	140 mT

※1. 数値は、各部位の磁気ユニットに内蔵される磁極組の個数を表します。


※2. 定格電圧と定格電流の積で与えられる理論値で、磁気の強さに関係します（消費電力ではありません）。

電気用品安全法
技術基準適合確認済




各部のなまえ

● 本体

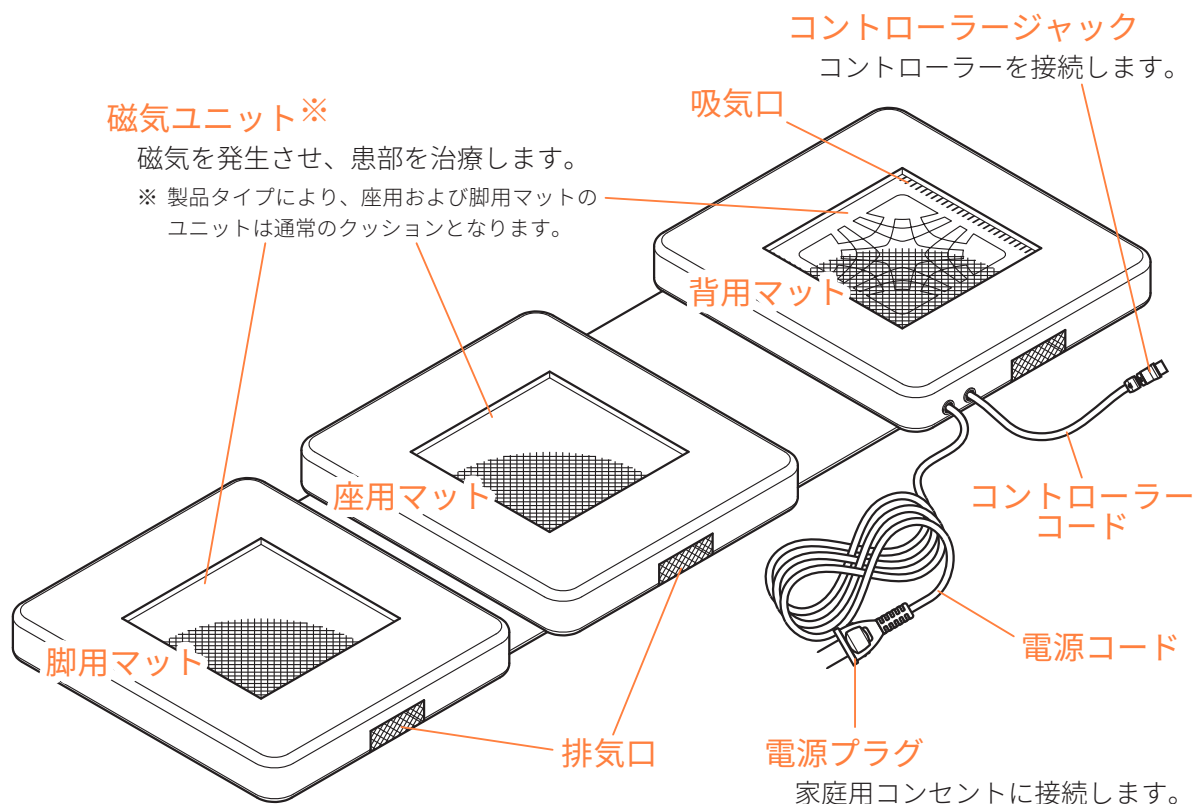

各部のなまえ (つづき)


● コントローラー

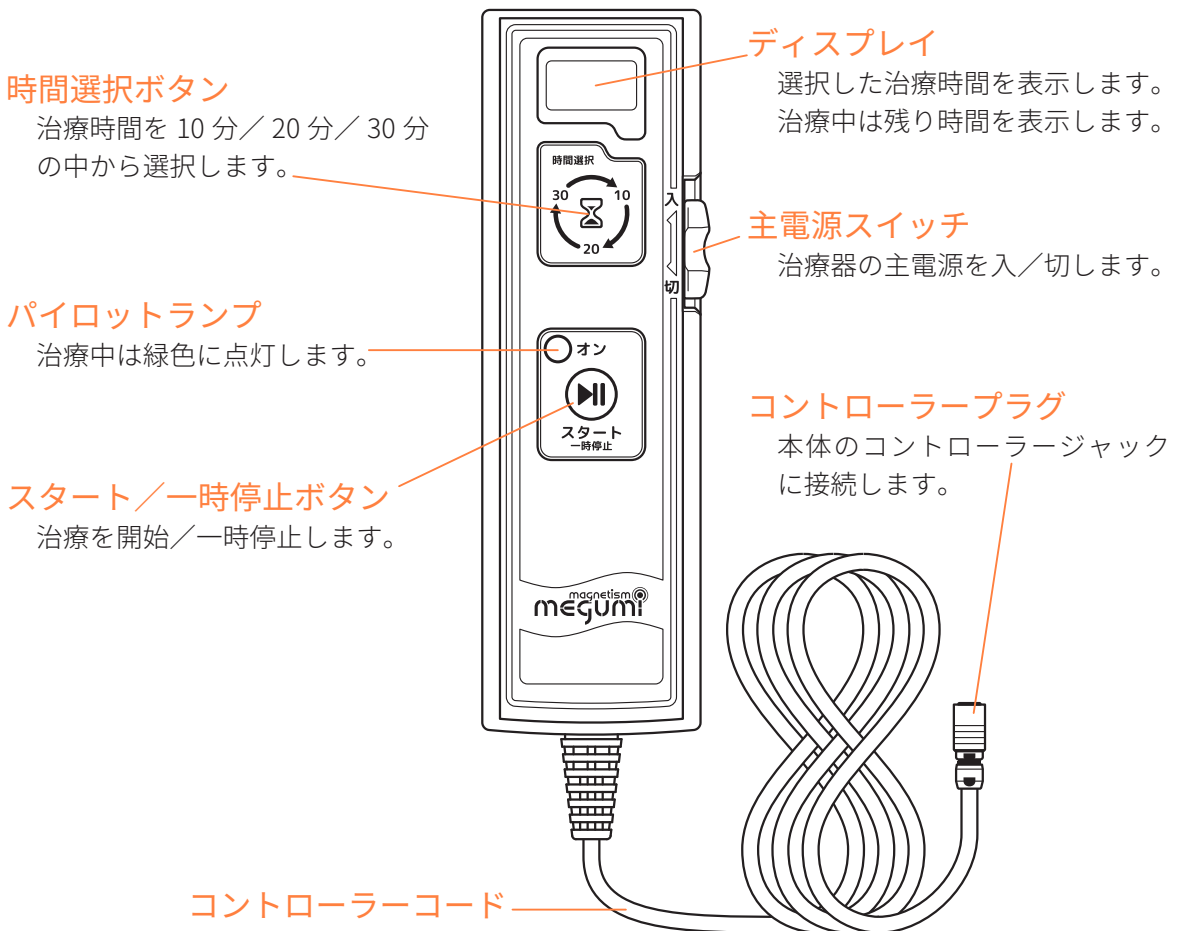

● 付属品


スパーサークッション

本体を椅子などの上に設置する場合に、背用マットの位置を調節するために使います。

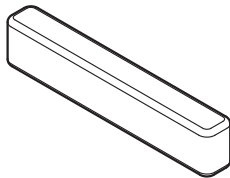

磁気テスター

磁気ユニットから発生する交流磁気に反応して、封入された磁石が激しく振動します。

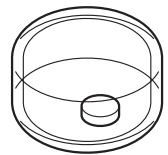


取扱説明書・保証書
添付文書

設置のしかた

本体を設置する

● 床に設置する場合


右図のように本体をまっすぐに広げ、**水平で強度のある床**に設置してください。

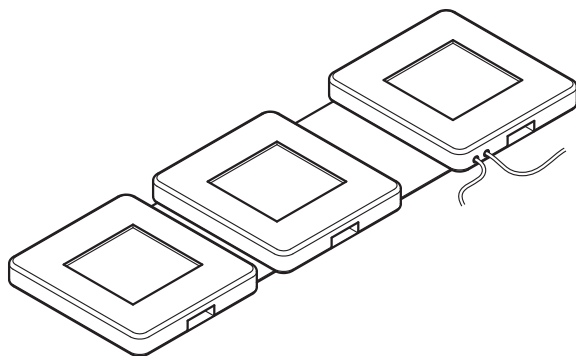

● 椅子などの上に設置する場合

右図のように本体を折り曲げ、**安定した強度のある椅子**の上に設置してください。

ユーザーの座高に合わせて任意で付属のスペーサークッションを挿入し、背用マットの位置を調節してください。

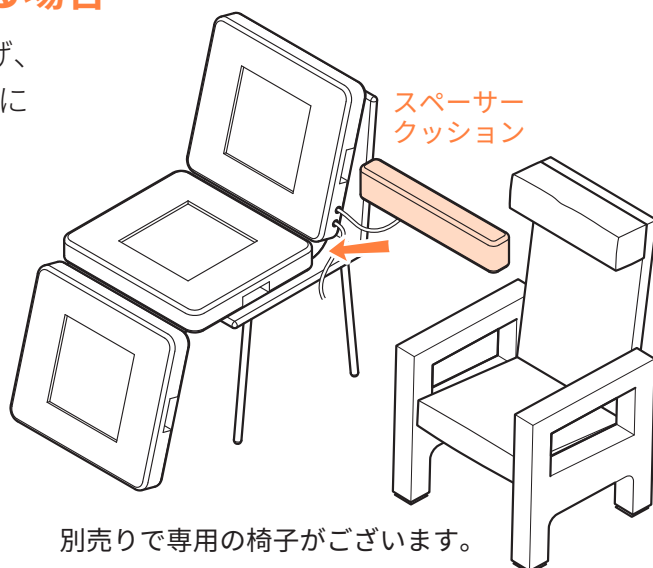


警告

- ★ 柔らかい場所、曲面、凹凸のある床、不安定な椅子の上などには設置しないでください。マットの変形および転倒・落下による破損や故障、怪我の原因になります。
- ★ **本体側面の排気口の周囲に十分な空間を確保してください。**排気口がふさがっていると磁気ユニット内に熱がこもり、破損や故障、低温火傷の原因になります。

コントローラーを本体に接続する


● 接続の手順

1

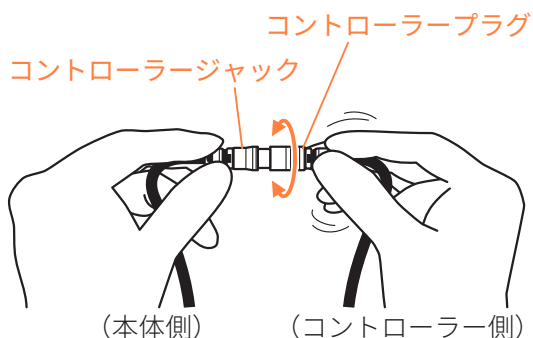

コントローラープラグとジャックは嵌め合いの位置が決まっています。両者を軽く押し当てながら、プラグを左右に回して嵌め合いの位置を探します。


2

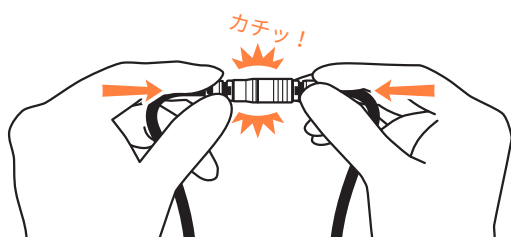

両側からまっすぐ押し込みます。正しく嵌め合うと、カチッと音がしてロックされます。

● 取り外すときは

3

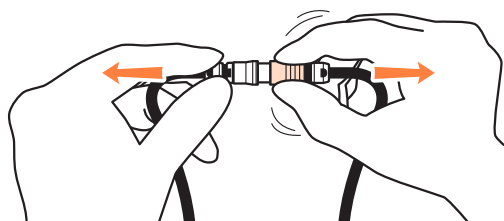

コントローラープラグの図の部位をつまんで引くとロックが解除されます。そのまま両側へまっすぐ引き抜きます。


⚠ 注意

- ★ コントローラーの接続および取り外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- ★ コントローラープラグとジャックはねじ込み式ではありません。接続および取り外しの際は必ず上記手順に従い、無理な力はかけないでください。破損の原因になります。
- ★ 取り外すときは、コードを持たずに必ず先端のプラグおよびジャックをつまんで引き抜いてください。

治療のしかた

治療を開始する

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 本体に乗ります。
- 3 コントローラーの主電源スイッチを「入」にします。

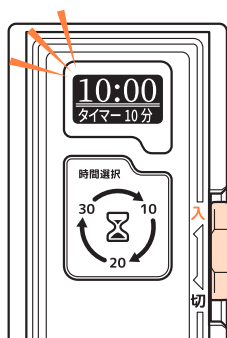

ピッと音が鳴ってディスプレイが点灯し、前回選択した治療時間が表示されます。出荷時に選択されている治療時間は 10 分です。

↑ 「入」の位置まで、上方向にスライドさせます。

- 4 時間選択ボタンを **長押し** して、治療時間を選択します。



3 秒以上長押し するたびにピッと音が鳴り、治療時間が 10 分 → 20 分 → 30 分 → 10 分 → … の順に選択されます。

- 5 スタート／一時停止ボタンを押して、治療を開始します。



ピッと音が鳴り、パイロットランプが緑色に点灯します。ディスプレイ上部の時間表示が、治療終了までの残り時間とともに減少していきます。付属の**磁気テスター**を磁気ユニットに近づけ、正常に磁気が出ている（封入された磁石が激しく振動する）ことを確認します。

治療を一時停止する

治療中にスタート／一時停止ボタンを押します。



ピッと音が鳴り、パイロットランプが消灯します。ディスプレイ上部の、残り時間表示の減少が停止します。

治療を再開する

一時停止中にスタート／一時停止ボタンを押します。




ピッと音が鳴り、パイロットランプが緑色に点灯します。
ディスプレイ上部の、残り時間表示の減少が再開します。

治療を終了する

1 選択した治療時間が経過すると、自動的に終了します。

ピーッと音が鳴り、パイロットランプが消灯します。
ディスプレイ上部の時間表示が、治療時間選択直後の状態に戻ります。

2 コントローラーの主電源スイッチを「切」にします。

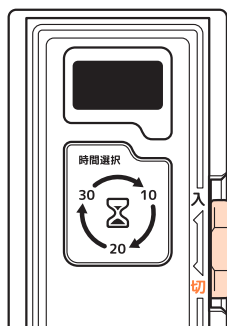

ディスプレイが消灯します。

「切」の位置まで、下方向にスライドさせます。

3 電源プラグをコンセントから抜きます。

治療を中断するには

1 治療中に、コントローラーの主電源スイッチを「切」にします。

パイロットランプおよびディスプレイが消灯します。

2 電源プラグをコンセントから抜きます。


⚠ 注意

- ★ 使用後は必ず主電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ★ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

お手入れ・保管のしかた


お手入れのしかた

● マット

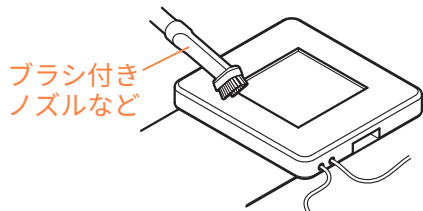

電気掃除機などで表面のほこりを取り除いてください。

● 磁気ユニット

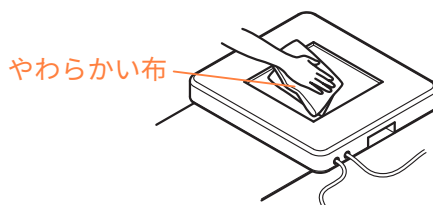


中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。その後、洗剤が残らないように十分ふき取ってください。

⚠ 注意

- ★ **丸洗いはできません。** 水をかけないでください。故障の原因になります。
- ★ 有機溶剤、研磨剤、アルカリ性洗剤などは使わないでください。変形、変色、破損の原因になります。

保管のしかた

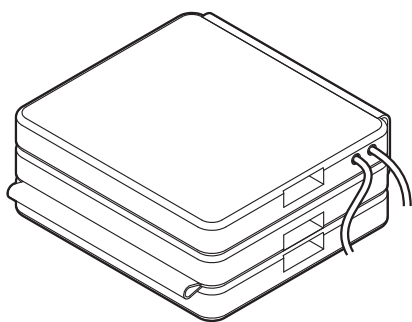

左図のように折りたたんで保管できます。次のような場所を**避けて**保管してください。

- 湿気の多い場所
- ほこりの多い場所
- 日の当たる場所
- 暖房器具のそば

⚠ 注意

- ★ 本体の移動は、コード類を引っ張らず必ずマット部を持って行ってください。
- ★ 本体およびコントローラーは精密機器です。高所に保管したり、重いものを上にのせた状態で保管しないでください。落下・加重による破損や故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に 次の点を今一度ご確認ください

● こんなときは

- └ この点を確認し
- └ このように直します。

● 電源が入らない

- └ 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
 - └ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- └ コントローラーが本体に接続されていますか。
 - └ コントローラーを本体に接続します。 → P.10
- └ ブレーカーが切れていませんか。
 - └ ブレーカーを入れます。

● 治療が開始されない

- └ スタート/一時停止ボタンを押しましたか。
 - └ 電源を入れた後、スタート/一時停止ボタンを押します。 → P.11、12

● 時間選択ができない

- └ 時間選択ボタンを長押ししましたか。
 - └ 時間選択ボタンを **3秒以上長押し** します。 → P.11
- └ パイロットランプが点灯していませんか。
 - └ 時間選択ボタンは、治療中（パイロットランプが点灯しているとき）は操作できません。スタート/一時停止ボタンを押して治療を一時停止するか、電源を入れ直して治療を中断した後に操作してください。

● 磁気が出ていない

- └ 磁気ユニットが熱くなっていませんか。
 - └ 過昇温に対する安全装置がはたらいている可能性があります。電源を切って磁気ユニットが十分に冷えるのを待ち、電源を入れ直してください。
 - └ 本体側面の排気口の周囲に十分な空間を確保してください。排気口がふさがっていると磁気ユニット内に熱がこもりやすくなります。

いずれにも該当しない場合は販売業者にご相談ください。

保証について

- ★ 保証期間中の修理は保証書に記載の保証規定にもとづき行わせていただきますので、お買い上げ年月日、販売業者名等の必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
- ★ **保証期間はお買い上げ日から1年です。**
- ★ 保証期間経過後につきましても、修理して使用できる場合には、ご希望により有料修理させていただきます。

製造販売元 *ASAHI Co., Ltd.* 株式会社 朝日

<http://www.asahi-health.co.jp>